



## Uso del estimulador sin el programador

Instrucciones en vídeo



ARC<sup>EX</sup>

⚠ Utilice el estimulador sin el programador solo si puede recordar dónde se colocan los electrodos y la configuración del cableado

### 1 Encienda el estimulador



### 2 Prepare la piel del siguiente modo:


- No coloque los electrodos sobre piel irritada
- Limpie la piel donde se vayan a colocar los electrodos
- Asegúrese de que la piel esté seca antes de colocar los electrodos




### 3 Coloque los electrodos según el programa



### 4 Conecte los electrodos a los cables de extensión

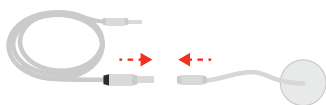

### 5 Conecte los cables de extensión a la caja distribuidora según el programa

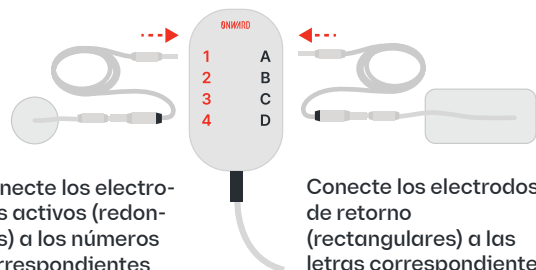

Conecte los electrodos activos (redondos) a los números correspondientes

Conecte los electrodos de retorno (rectangulares) a las letras correspondientes

### 6 Conecte la caja distribuidora al estimulador



### 7 Inicie la estimulación



### 8 Controle la estimulación



Disminuir la amplitud  
Aumentar la amplitud  
Pausar estimulación  
En pausa, mantenga pulsado 3 s para detener la estimulación

#### Tras terminar una sesión:

1. Apague el estimulador, desconecte la caja distribuidora del estimulador y retire los electrodos
2. Limpie y cargue el estimulador si es necesario
3. Meta todos los componentes en el estuche
4. Compruebe la integridad de la piel (erupción cutánea o quemaduras)

ONWARD

ARC<sup>EX</sup>

## Guía de referencia rápida Uso personal

### Contacto de ONWARD

- ☎ Número gratuito de EE. UU.: +1 (866) 217 0817
- ☎ EE. UU.: +1 (617) 488 8642
- ☎ Europa: +31 40 288 2830
- 🌐 [www.onwd.com/support](http://www.onwd.com/support)


Solo para uso de ONWARD



2025/12/01

P/N EXQRG01PERES rev 1

### Componentes ARC<sup>EX</sup>:

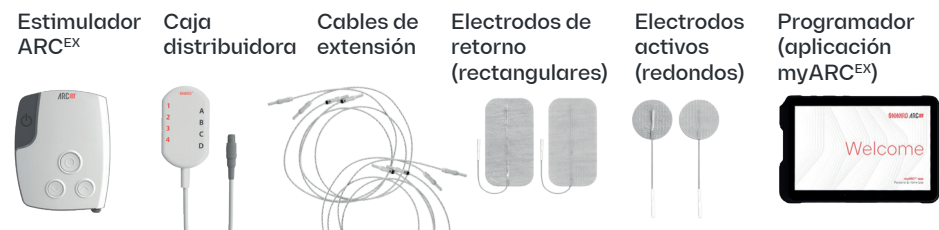

- ⚠ • No coloque los electrodos sobre piel irritada. Coloque los electrodos según las instrucciones de su profesional de la rehabilitación (consulte la pantalla «Canales»).
- Asegúrese de que los cables de extensión estén conectados a los electrodos y a la caja distribuidora exactamente de la misma manera indicada por su profesional de la rehabilitación. Una configuración incorrecta puede aumentar la probabilidad de espasmos musculares, rigidez, hormigueo o entumecimiento, cambios en la frecuencia cardíaca o disreflexia autonómica.

Antes de usar el sistema ARC<sup>EX</sup>, consulte las instrucciones de uso de ARC<sup>EX</sup> para conocer todas las ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES.



# Uso del estimulador con el programador



ARC EX

Uso sin el programador

Pasar página ➔

1

Encienda el estimulador y luego el Programador. Seleccione «Conectar dispositivo»

2

Seleccione el estimulador

3

Seleccione el programa y pase a la pantalla «Canales»

4

Limpie la piel en las ubicaciones que se muestran en la pantalla «Canales» del programador. No continúe si nota irritación en la piel

5

Coloque los electrodos en su cuerpo según la pantalla «Canales» del programador  
(la imagen de abajo es un ejemplo)

6

Conecte los electrodos a los cables de extensión

7

Conecte los cables de extensión a la caja distribuidora según la pantalla «Canales»

8

Conecte la caja distribuidora al estimulador

9

Continúe y confirme la ubicación de los electrodos

10

Inicie la estimulación

11

Controle la estimulación

Tras terminar una sesión:

1. Apague el estimulador y el programador, desconecte la caja distribuidora del estimulador y retire los electrodos
2. Limpie y cargue el programador y el estimulador si es necesario
3. Meta todos los componentes en el estuche
4. Compruebe la integridad de la piel (erupción cutánea o quemaduras)