



## Gebruik van de stimulator zonder de programmeertools

Instructie-  
video



ARC EX

⚠ Gebruik de stimulator alleen zonder de programmeertools als u zich kunt herinneren waar de elektrodes moeten worden geplaatst en hoe de kabels moeten worden aangesloten

### 1 Schakel stimulator in



### 2 Bereid huid als volgt voor:


- Plaats elektrodes niet op geïrriteerde huid
- Reinig uw huid waar elektrodes worden geplaatst
- Zorg dat huid droog is voordat u elektrodes aanbrengt



### 3 Plaats elektrodes volgens het programma



### 4 Sluit elektrodes aan op verlengkabels

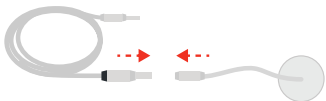

### 5 Sluit verlengkabels aan op splitterdoos



Sluit actieve elektrodes (rond) aan op bijbehorende cijfers

Sluit retourelektrodes (rechthoekig) aan op bijbehorende letters

### 6 Sluit splitterdoos aan op stimulator



### 7 Start stimulatie



### 8 Stimulatie aanpassen



- ⏮ Amplitude verlagen
- ⏩ Amplitude verhogen
- ⏹ Stimulatie onderbreken

Wanneer onderbroken: houd 3 sec. ingedrukt om stimulatie te stoppen.

Als de sessie klaar is:

1. Schakel stimulator uit, koppel splitterdoos los van stimulator en verwijder elektrodes
2. Reinig stimulator en laad hem zo nodig op
3. Doe alle componenten terug in koffer
4. Controleer huid op irritatie of verbranding

ONWARD

# ARC EX

## Beknopte handleiding persoonlijk gebruik

### Contactgegevens van ONWARD

- ☎ VS gratis: +1 (866) 217 0817
- ☎ VS: +1 (617) 488 8642
- ☎ EU: (+31) (0)40 288 2830
- 🌐 [www.onwd.com/support](http://www.onwd.com/support)

Alleen voor gebruik ONWARD



2026/01/23

P/N EXQRG01PERNL rev 1

### ARC EX-componenten:

ARC EX-stimulator    Splitterdoos    Verlengkabels    Retourelektrodes (rechthoekig)    Actieve Elektrodes (rond)    Programmeertools myARC EX-app



- ⚠ Plaats elektrodes niet op geïrriteerde huid. Plaats Elektrodes volgens instructies van uw revalidatieprofessional (raadpleeg scherm "Kanalen").
- Zorg ervoor dat de verlengkabels op exact dezelfde manier zijn aangesloten op de elektroden en de splitterdoos, zoals voorgeschreven door uw revalidatieprofessional. Een onjuiste aansluiting kan de kans vergroten op spierspasmen, stijfheid, tintelingen of gevoelloosheid, verandering van de hartslag of autonome dysreflexie.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het ARC EX-systeem voor alle WAARSCHUWINGEN en VOORZORGSMATREGELEN.



# Gebruik van de stimulator met de programmeertool



Gebruik zonder de programmeertool [Zie ommezijde](#)

**1** Schakel de stimulator en daarna programmeertool in. Ga door naar "Apparaat koppelen"

1. Hand icon pointing to the stimulator's power button.

2. Hand icon pointing to the programming tool's screen.

**2** Selecteer de stimulator

Hand icon pointing to the 'Apparaat selecteren' screen showing two stimulator options.

**3** Selecteer een programma en ga door naar scherm "Kanalen"

Hand icon pointing to the 'Programma selecteren' screen.

**4** Reinig de huid op de plaatsen volgens het scherm "Kanalen" op de programmeertool. Ga niet door als u geïrriteerde huid opmerkt

Hand icon pointing to the skin cleaning area on the programming tool screen.

**5** Plaats de elektrodes op uw lichaam volgens het scherm "Kanalen" op de programmeertool (afbeelding hieronder is een voorbeeld)

Hand icon pointing to the electrode placement diagram on the programming tool screen.

**6** Sluit de elektrodes aan op de verlengkabels

Hand icon pointing to the connection of electrodes to extension cables.

**7** Sluit verlengkabels aan op splitterdoos volgens het scherm "Kanalen"

Hand icon pointing to the connection of extension cables to the splitter box.

Sluit actieve elektrodes (rond) aan op bijbehorende cijfers

Sluit de retourelektrodes (rechthoekig) aan op de bijbehorende letters

**8** Sluit de splitterdoos aan op de stimulator

Hand icon pointing to the connection of the splitter box to the stimulator.

**9** Ga door en bevestig plaats van elektrodes

Hand icon pointing to the confirmation button on the programming tool screen.

**10** Start stimulatie

Hand icon pointing to the 'Stimulatie starten' button on the programming tool screen.

**11** Stimulatie aanpassen

Hand icon pointing to the adjustment controls on the programming tool screen.

- Amplitude verlagen
- + Amplitude verhogen
- || Stimulatie onderbreken
- Stimulatie stoppen

**Na beëindiging van een sessie:**

- Schakel stimulator en programmeertool uit, koppel splitterdoos los van stimulator en verwijder elektrodes
- Reinig programmeertool en stimulator en laad ze zo nodig op
- Doe alle componenten terug in koffer
- Controleer huid op irritatie of verbranding