



# Utilisation du stimulateur sans le programmeur



ARC EX

⚠ Utilisez le stimulateur sans le programmeur uniquement si vous pouvez vous rappeler où placer les électrodes et la configuration des câbles

**1** Allumer le stimulateur



**2** Préparer la peau comme suit :


- Ne pas placer d'électrodes sur une peau irritée
- Nettoyer la peau à l'endroit où les électrodes seront fixées
- S'assurer que la peau est sèche avant de fixer les électrodes



**3** Placer les électrodes conformément au programme



**4** Connecter les électrodes aux câbles d'extension

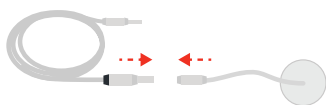

**5** Connecter les câbles d'extension au boîtier de répartition



Connecter les électrodes actives (rondes) aux numéros correspondants

Connecter les électrodes de retour (rectangulaires) aux lettres correspondantes

**6** Brancher le boîtier de répartition sur le stimulateur



**7** Démarrer la stimulation



**8** Contrôler la stimulation



- ⏮ Diminuer l'amplitude
- ⏭ Augmenter l'amplitude
- ⏸ Mettre en pause la stimulation

Une fois en pause, maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour arrêter la stimulation.

Après avoir terminé une séance :

1. Éteindre le stimulateur, débrancher le boîtier de répartition du stimulateur et retirer les électrodes
2. Nettoyer et charger le stimulateur si nécessaire
3. Remettre tous les composants dans la valise
4. Vérifiez l'intégrité de la peau (rash cutané ou brûlures)

ONWARD

# ARC EX

## Guide de référence rapide Utilisation personnelle

### Contactez ONWARD

- ☎ Numéro gratuit aux États-Unis : +1 (866) 217 0817
- ☎ États-Unis : +1 (617) 488 8642
- ☎ Union européenne : +31 40 288 2830
- 🌐 [www.onwd.com/support](http://www.onwd.com/support)

À l'usage exclusif d'ONWARD




2026/01/23

P/N EXQRG01PERFR rev 1

### Composants ARC EX :

Stimulateur ARC EX	Boîtier de répartition	Câbles d'extension	Électrodes de retour (rectangulaires)	Électrodes actives (rondes)	Programmeur (application myARC EX)
--------------------	------------------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

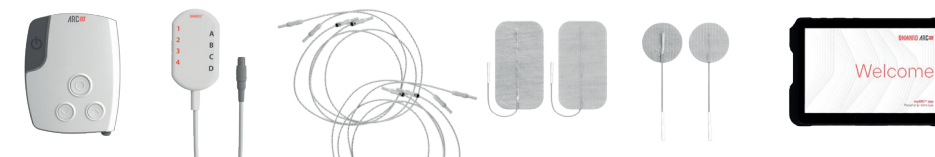

- ⚠ Ne pas placer d'électrodes sur une peau irritée. Placer les électrodes selon les instructions de votre professionnel de réhabilitation (consulter l'écran « Canaux »).
- Assurez-vous que les câbles d'extension sont connectés aux électrodes et au boîtier de répartition exactement comme indiqué par votre professionnel de réhabilitation. Une configuration incorrecte peut augmenter le risque de spasmes musculaires, de raideurs, de picotements ou d'engourdissements (fourmillements), de modifications du rythme cardiaque ou de dysrétflexie autonome.

Avant d'utiliser le système ARC EX, consulter la notice d'utilisation du système pour prendre connaissance de tous les AVERTISSEMENTS et toutes les MISES EN GARDE.



# Utilisation du stimulateur avec le programmeur



**1** Allumer le stimulateur, puis le programmeur. Passer à « Connecter le stimulateur »

**2** Sélectionner le stimulateur

**3** Sélectionner le programme et passer à l'écran « Canaux »

**4** Nettoyer la peau aux positions indiquées sur l'écran « Canaux » du programmeur. Ne poursuivez pas en cas d'irritation de la peau

**5** Placer les électrodes sur votre corps conformément à l'écran « Canaux » du programmeur (l'image ci-dessous est un exemple)

**6** Connecter les électrodes aux câbles d'extension

**7** Connecter les câbles d'extension au boîtier de répartition, conformément à l'écran « Canaux »

Connecter les électrodes actives (rondes) aux numéros correspondants

Connecter les électrodes de retour (rectangulaires) aux lettres correspondantes

**8** Brancher le boîtier de répartition sur le stimulateur

**9** Continuer et confirmer la position des électrodes

**10** Démarrer la stimulation

**11** Contrôler la stimulation

⊖ Diminuer l'amplitude

⊕ Augmenter l'amplitude

⏸ Mettre la stimulation en pause

⏹ Arrêter la stimulation

Après avoir terminé une séance :

1. Éteindre le stimulateur et le programmeur, débrancher le boîtier de répartition du stimulateur et retirer les électrodes
2. Nettoyer et charger le programmeur et le stimulateur si nécessaire
3. Remettre tous les composants dans la valise
4. Vérifier l'intégrité de la peau (rash cutané ou brûlures)